



## Cryotec: Navodila za uporabnike

**Glavni material:** telo (vsebina: polietilen tereftalat 98 %), folija (vsebina: polietilen tereftalat  $\geq 99$  %)

**Oblika:** shranjevanje tkiv

**Model:** TEC 010Y, TEC 010B, TEC 010W, TEC 010R, TEC 010G

**Ovojnina:** Notranja ovojnina: na gama-žarke odporen PP (polipropilen) / Zunanja ovojnina: vreča iz OPP (usmerjeni polipropilen)

**Sterilizacija:** sterilizirano z gama-žarko

**Temperatura:** med skladiščenjem 10 °C–25 °C

**Rok uporabnosti:** 2 leti po datumu sterilizacije.

**Namen uporabe:** Za vitrifikacijo sesalskih celic, tkiv, jajčnih celic, zarodkov in blastocist.

**Navodilo za uporabo:**

Odstranite pokrovček in namestite celice na prozorno folijo tako, da je krioprotektant dovolj infiltriran. Takoj vstavite v tekoči dušik, da zmrzne. S kleščami zaprite pokrovček znotraj tekočega dušika. Shranite v posodo s tekočim dušikom. V času odtajanja s kleščami odprite pokrovček v tekočem dušiku in opravite odtajanje.

**Postopek odstranjevanja:** Ker je izdelek po uporabi kontaminiran, ga pravilno zavrzite v skladu z zakoni in predpisi vaše države.

**REPROLIFE Inc.**  
2-5-3 9F Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokio, 160-0022 Japonska  
Telefon: +81359258931  
E-pošta: contact@reprolife.jp, URL izdelka: https://reprolife.jp/en

**EC REP MT Promedt Consulting GmbH**  
Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Nemčija  
Telefon: +496894581020



IFU-004103, 2026-04-23 1/3


### Pozor:

- Medtem ko pokrovček snemate in nameščate, naj se folija ne dotika pokrovčka.
- Celoten postopek uporabe sistema Cryotec je treba izvajati pri sobni temperaturi.
- Pri nameščanju pokrovčka ga ne prijemajte tesno s pinceto, saj lahko to poškoduje izdelek.
- Pri popolnem zapiranju pokrovčka ne uporabljajte pincete; namesto tega ga s prsti čvrsto zasukajte, da preprečite zrahljanje pokrovčka in poškodbo izdelka.


### Previdnostni ukrep:

- Če se na embalaži ali izdelku ugotovijo kakršnekoli nepravilnosti, izdelka ne uporabljajte.
- Če je potekel datum izteka roka uporabnosti, tega izdelka ne smete uporabiti.
- Ta pripomoček sme uporabljati le strokovnjak z ustreznim znanjem in izkušnjami.
- Ta pripomoček je samo za enkratno uporabo.

### Vitrifikacija

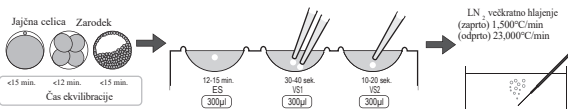

### Segrevanje

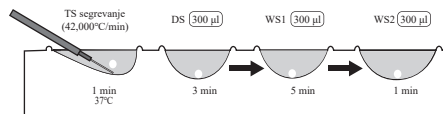

- \* Priporočamo uporabo raztopine in ploščice za vitrifikacijo in segrevanje.
- \* Raztopina in ploščice za vitrifikacijo in segrevanje se naročijo ločeno.

**Okrajšave:** PP (polipropilen), OPP (usmerjeni polipropilen), ES (raztopina za ekvilibracijo), VS1 (raztopina za vitrifikacijo 1), VS2 (raztopina za vitrifikacijo 2), TS (raztopina za segrevanje), DS (raztopina za redčenje), WS1 (raztopina za spiranje 1), WS2 (raztopina za spiranje 2), LN2 (tekoči dušik)

IFU-004103, 2026-04-23 2/3

## Simboli

Št.	Simbol	Opis	Št.	Simbol	Opis	Št.	Simbol	Opis
1		Proizvajalec	7		Ponovna uporaba ni dovoljena	13		Omejitev temperature
2		Kataložna številka	8		Ponovna sterilizacija ni dovoljena	14		Država izdelave Izdelano na Japonskem
3		Pooblaščen zastopnik v ES	9		Sterilizirano z obsevanjem	15		Medicinski pripomoček
4		Datum izteka roka uporabnosti	10		Preberite navodila za uporabo	16		Sistem z enojno sterilno pregrado z zaščitno embalažo v zunanosti
5		Datum proizvodnje	11		Znak CE z odobritvijo DEKRA	17		
6		Oznaka serije	12		Ne uporabite, če je ovojnina odprta ali poškodovana	18		

IFU-004103, 2026-04-23 3/3