



Cryotec: Navodila za uporabnike

Glavni material: telo (vsebina: polietilen tereftalat 98 %), folija (vsebina: polietilen tereftalat $\geq$ 99 %)

Oblika: shranjevanje tkiv

Model: TEC 010Y, TEC 010B, TEC 010W, TEC 010R, TEC 010G

Ovojnina: Notranja ovojnina: na gama-žarke odporen PP (polipropilen) / Zunanja ovojnina: vreča iz OPP (usmerjeni polipropilen)

Sterilizacija: sterilizirano z gama-žarki

Temperatura: med skladiščenjem 10 °C~25 °C

Rok uporabnosti: 2 leti po datumu sterilizacije.

Namen uporabe: Za vitifikacijo sesalskih celic, tkiv, jajčnih celic, zarodkov in blastocist.

Navodilo za uporabo:

Odstranite pokrovček in namestite celice na prozorno folijo tako, da je krioprotektant dovolj infiltriran. Takoj vstavite v tekoči dušik, da zmrzne. S kleščami zaprite pokrovček znotraj tekočega dušika. Shranite v posodo s tekočim dušikom. V času odtajanja s kleščami odprite pokrovček v tekočem dušiku in opravite odtajanje.

Postopek odstranjevanja: Ker je izdelek po uporabi kontaminiran, ga pravilno zavrzite v skladu z zakoni in predpisi vaše države.



REPROLIFE Inc.

2-5-3 9F Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokio, 160-0022 Japonska

Telefón: +81359258931

E-pošta: contact@reprolife.jp URL izdelka: <https://reprolife.jp/en>



MT Promedt Consulting GmbH

Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Nemčija

Telefón: +496894581020




Pozor:

- 1) Medtem ko pokrovček snemate in nameščate, naj se folija ne dotika pokrovčka.
- 2) Če je ovojčina raztrgana ali poškodovana, izdelka ne uporabite, ampak ga zavržite.
- 3) Celoten postopek z uporabo Cryotec je treba izvesti pri sobni temperaturi.
- 4) Ta izdelek smejo uporabljati samo specialisti.


Previdnostni ukrep:

- 1) Izdelkov s poškodovano ovojčino ne smete uporabiti.
- 2) Če je potekel datum izteka roka uporabnosti, tega izdelka ne smete uporabiti.
- 3) Ta pripomoček sme uporabljati le tehnično usposobljen in izkušen zdravnik.
- 4) Ta pripomoček je samo za enkratno uporabo.

Vitrifikacija

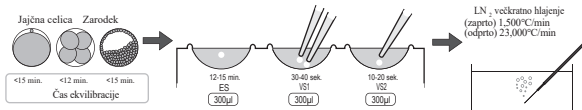

Segrevanje

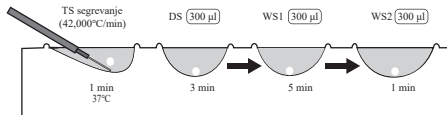

* Priporočamo uporabo raztopine in ploščice za vitrifikacijo in segrevanje.

* Raztopina in ploščice za vitrifikacijo in segrevanje se naročijo ločeno.

Okrajšave: PP (polipropilen), OPP (usmerjeni polipropilen), ES (raztopina za ekvilibracijo), VS1 (raztopina za vitrifikacijo 1), VS2 (raztopina za vitrifikacijo 2), TS (raztopina za segrevanje), DS (raztopina za redčenje), WS1 (raztopina za spiranje 1), WS2 (raztopina za spiranje 2), LN2 (tekoči dušik)

Simboli

Št.	Simbol	Opis	Št.	Simbol	Opis	Št.	Simbol	Opis
1		Proizvajalec	7		Ponovna uporaba ni dovoljena	13		Omejitev temperature
2		Kataložna številka	8		Ponovna sterilizacija ni dovoljena	14		Država izdelave Izdelano na Japonskem
3		Pooblaščen zastopnik v ES	9		Sterilizirano z obsevanjem	15		Medicinski pripomoček
4		Datum izteka roka uporabnosti	10		Preberite navodila za uporabo	16		Sistem z enojno sterilno pregrado z zaščitno embalažo v zunanosti
5		Datum proizvodnje	11		Znak CE z odobritvijo DEKRA	17		Vsebnost ali prisotnost
6		Oznaka serije	12		Ne uporabite, če je ovojnina odprta ali poškodovana	18		