

Navodilo za uporabnike ploščic za shranjevanje tkiv

Previdno: Izdelkov s poškodovano ovojnino ne smete uporabiti. Če je datum izteka roka uporabnosti potekel, tega izdelka ne smete uporabiti.

Pozor med uporabo: Ta pripomoček sme uporabljati le specialist, ki je opravil tečaj usposabljanja. Ta pripomoček je samo za enkratno uporabo.

Pozor pri skladiščenju: Prepričajte udarce ali pritiske, npr. zaradi padca ali odlaganja bremen.

Glavni material: polistiren

Oblika: ploščica za shranjevanje tkiv

Model: VP 010 (10 kosov), WP 010 (10 kosov)

Ovojnina: primarna ovojnina: vrečka iz OPP / sekundarna ovojnina: vrečka iz OPP (samo za 10 kosov)

Sterilizacija: sterilizirano z gama-žarki

Temperatura: Med skladiščenjem: 10 °C~25 °C

Rok uporabnosti: 2 leti po datumu sterilizacije.

Namen uporabe: Za vitrifikacijo ali segrevanje sesalskih celic, tkiv, jajčnih celic, zarodkov in blastocist.

Navodilo za uporabo

Ploščica za vitrifikacijo: Odprite vrečko in vzemite ploščico iz nje. Položite jo na stojalo mikroskopa. Ploščica ima 3 vdolbine na sprednji strani in kanal za Cryotec na zadnji strani. Odprite pokrov in v vsako vdolbino napolnite z ustrezno raztopino. Postopek izvajajte pri sobni temperaturi.

Ploščica za segrevanje: Odprite vrečko, vzemite ploščico iz nje, pustite pokrov zaprt in ploščico vstavite v inkubator pri 37 °C < 3 ure pred uporabo. Vzemite ploščico iz inkubatorja in jo namestite (s kvadratno vdolbino na levi strani) na stojalo mikroskopa. Odprite pokrov in v vsako vdolbino napolnite z ustrezno raztopino.

Postopek izvajajte pri sobni temperaturi.


Postopek odstranjevanja: Ker je izdelek po uporabi kontaminiran, ga pravilno zavrzite v skladu z zakoni in predpisi vaše države.

REPROLIFE Inc.
2-5-3-9F Shinjuku Shinjuku-ku Tokio, 160-0022 Japonska Telefon: +81359258931
E-pošta: contact@reprolife.jp URL izdelka: <https://reprolife.jp/en>


ECREP MT Promedt Consulting GmbH
Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Nemčija
Telefon: +496894581020

CE
0344

Vitrifikacija

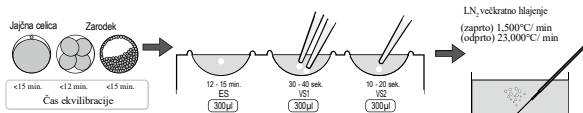

Segrevanje

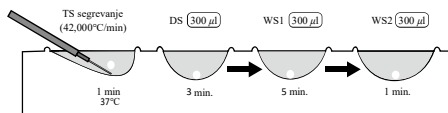

* Priporoča se kombinirana uporaba z raztopino za vitrifikacijo in segrevanje ter Cryotec.

Okrajšave: OPP (usmerjeni polipropilen), ES (raztopina za ekvilibracijo), VS1 (raztopina za vitrifikacijo 1), VS2 (raztopina za vitrifikacijo 2), TS (raztopina za segrevanje), DS (raztopina za redčenje), WS1 (raztopina za spiranje 1), WS2 (raztopina za spiranje 2), LN2 (tekoči dušik)

Simboli

Št.	Simbol	Opis	Št.	Simbol	Opis	Št.	Simbol	Opis
1		Proizvajalec	7		Ponovna uporaba ni dovoljena	13		Omejitev temperature
2		Kataložna številka	8		Ponovna sterilizacija ni dovoljena	14		Država izdelave Izdelano na Japonskem
3		Pooblaščen zastopnik v ES	9		Sterilizirano z obsevanjem	15		Medicinski pripomoček
4		Datum izteka roka uporabnosti	10		Preberite navodila za uporabo	16		Sistem z enojno sterilno pregrado z zaščitno embalažo v zunanosti
5		Datum proizvodnje	11		Znak CE z odobritvijo DEKRA	17		Vsebnost ali prisotnost
6		Oznaka serije	12		Ne uporabite, če je ovojnina odprta ali poškodovana	18		