



Instrucțiuni Cryotec pentru utilizatori

Material principal: corp (conținut: polietilen tereftalat 98%), folie filmată (conținut: polietilen tereftalat $\geq 99\%$)

Formă: Depozitare țesut

Model: TEC 010Y, TEC 010B, TEC 010W, TEC 010R, TEC 010G

Ambalare: **Pachetul interior:** PP (polipropilenă) rezistent la raze gama / **Ambalaj exterior:** Pungă OPP (polipropilenă orientată).

Sterilizare: Sterilizat cu raze gamma

Temperatura: În timpul depozitării: 10°C~25°C

Perioada de valabilitate: 2 ani de la data sterilizării.

Scopul utilizării: Pentru vitrificarea celulelor, țesutului, ovocitului, embrionului și blastocistului de mamifere.

Instrucțiuni de utilizare:

Scoateți capacul, puneți celulele pe foaia transparentă astfel încât crioprotectorul să fie suficient infiltrat. Imediat, puneți în interior azot lichid pentru a îngheța. Folosind penseta, închideți capacul din interiorul azotului lichid și depozitați-l într-un rezervor de azot lichid. În momentul decongelării, folosind penseta, deschideți capacul din interiorul azotului lichid și decongețați.

Procesul de eliminare: Deoarece produsul post-utilizat ar fi contaminat, vă rugăm să aruncați în mod corespunzător în conformitate cu legile și reglementările din țară



REPROLIFE Inc.

2-5-3-9F Shinjuku, Shinjuku-Ku, Tokyo, 160-0022 Japonia

Telefon: +81359258931

E-mail: contact@reprolife.jp URL-ul produsului: <https://reprolife.jp/en>



MT Promedt Consulting GmbH

Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Germania

Telefon: +496894581020




Atenție:

- 1) Țineți folia astfel încât să nu se atingă de capac în timp ce scoateți capacul și îl puneți.
- 2) Dacă ambalajul este rupt sau deteriorat, nu utilizați produsul și aruncați-l.
- 3) Întregul proces folosind Cryotec trebuie efectuat la temperatura camerei.
- 4) Numai specialistul (f/b) are voie să-l folosească.


Precauție:

- 1) Produsele cu ambalaj deteriorat nu pot fi utilizate.
- 2) Dacă data de valabilitate a trecut, produsul respectiv nu a putut fi utilizat.
- 3) Acest dispozitiv poate fi utilizat numai de un medic (f/b) cu expertiză și experiență.
- 4) Acest dispozitiv este de unică folosință.

Vitrificarea

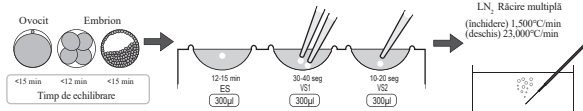

Încălzire

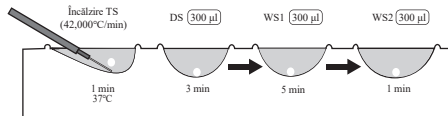

*Se recomandă utilizarea cu soluția de vitrificare și încălzire și plăci.

*Soluția sau plăcile de vitrificare și încălzire se transportă separat.

Abrevieri: PP (polipropilenă), OPP (polipropilenă orientată), ES (soluție de echilibrare), VS1 (soluție de vitrificare 1), VS2 (soluție de vitrificare 2), TS (soluție de încălzire), DS (soluție de diluare), WS1 (soluție de spălare 1), WS2 (soluție de spălare 2), LN2 (azot lichid)

Simboluri

Nr	Simbol	Descriere	Nr	Simbol	Descriere	Nr	Simbol	Descriere
1		Producător	7		Nu reutilizați	13		Limitarea temperaturii
2		Numărul catalogului	8		Nu resterilizați	14		Țara de fabricație Fabricat în Japonia
3		Reprezentant autorizat în CE	9		Sterilizat prin iradiere	15		Dispozitiv medical
4		Termen de valabilitate	10		Consultați instrucțiunile de utilizare	16		Sistem cu o singură barieră sterilă cu ambalaje de protecție în exterior
5		Data fabricației	11		Marcaj CE aprobat de DEKRA	17		Conține sau prezintă
6		Cod lot	12		Nu utilizați dacă pachetul unității este deschis sau deteriorat	18		