

Instrucțiuni pentru plăci de depozitare a țesuturilor pentru utilizatori

Precauție: Produsele cu ambalaj deteriorat nu pot fi folosite. Dacă data de valabilitate a trecut, produsul respectiv nu poate fi utilizat.

Atenție în timpul utilizării: Acest dispozitiv este folosit doar de un specialist care a urmat un curs de formare. Acest dispozitiv este de unică folosință.

Atenție în timpul depozitării: Evitați șocul sau presiunea, cum ar fi căderea și aplicarea unei sarcini mari.

Material de bază: Polistiren

Formă: Placă de depozitare a țesuturilor

Model: VP 010 (10 buc), WP 010 (10 buc)

Ambalare: Pachetul principal: Pungă OPP / pachet secundar: Pungă OPP (doar pentru 10 bucăți)

Sterilizare: Sterilizat cu raze gamma

Temperatura: În timpul depozitării: 10°C~ 25°C

Termen de valabilitate: 2 ani de la data sterilizării.

Scopul utilizării: Pentru a vitrifica sau a încălzi o celulă, un țesut, un ovocit, un embrion și un blastocist de mamifer.

Instrucțiuni de utilizare

Farfurie Vitri: Deschideți o pungă și scoateți farfuria. Puneți-o pe un suport de microscop. Placa are 3 godeuri pe partea din față și un șanț pentru Cryotec pe partea din spate. Deschideți capacul și umpleți fiecare godeu cu soluție. Aduceți la temperatura camerei.

Placă caldă: Deschideți o pungă, scoateți placa, țineți capacul închis și apoi puneți-o în incubator la 37°C < 3 ore înainte de utilizare. Scoateți-o din incubator și așezați-o (un godeu pătrat în partea stângă) pe suportul microscopului. Deschideți capacul și umpleți fiecare godeu cu soluție. Aduceți la temperatura camerei.

Procesul de eliminare: Deoarece produsul post-utilizat ar fi contaminat, vă rugăm să aruncați în mod corespunzător în conformitate cu legile și reglementările din țară.



REPROLIFE Inc.

2-5-3-9F Shinjuku Shinjuku-ku Tokyo, 160-0022 Japonia Telefon: +81359258931

E-mail: contact@reprolife.jp Adresa URL a produsului: <https://reprolife.jp/en>

ECREP


MT Promedt Consulting GmbH

Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Germania


Telefon: +496894581020

CE
0344

Vitrificarea

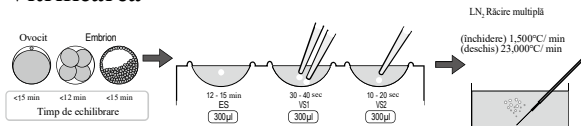

Încălzire

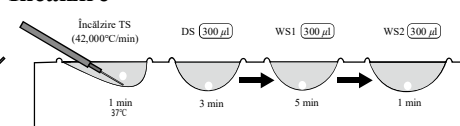

* Se recomandă utilizarea combinată cu soluția de vitrificare și încălzire și Cryotec.

Abrevieri: OPP (polipropilenă orientată), ES (soluție de echilibrare), VS1 (soluție de vitrificare 1), VS2 (soluție de vitrificare 2),

TS (soluție de încălzire), DS (soluție de diluare), WS1 (soluție de spălare 1), WS2 (soluție de spălare 2), LN2 (azot lichid)

Simboluri

Nr	Simbol	Descriere	Nr	Simbol	Descriere	Nr	Simbol	Descriere
1		Producător	7		Nu reutilizați	13		Limitarea temperaturii
2		Numărul catalogului	8		Nu resterilizați	14		Tara de fabricație Fabricat în Japonia
3		Reprezentant autorizat în CE	9		Sterilizat prin iradiere	15		Dispozitiv medical
4		Termen de valabilitate	10		Consultați instrucțiunile de utilizare	16		Sistem cu o singură barieră sterilă cu ambalaje de protecție în exterior
5		Data fabricației	11		Marcaj CE aprobat de DEKRA	17		Conține sau prezintă
6		Cod lot	12		Nu utilizați dacă pachetul unității este deschis sau deteriorat	18		